

FICHA TECNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	MAYFIELD
Modelo	F1511
Producto	Mascarilla Protección KN95
Estándar	GB2626—2019
Uso	No médica
Registro y certificación	FDA y CE

Cada mascarilla KN 95, cuenta con un empaque sanitario individual de importación completamente sellado y han sido colocadas de manera que garantiza su protección e inocuidad durante el proceso de distribución.



DATOS TÉCNICOS

1 Capa externa	Tela no tejida de polipropileno tipo SS de 25 g/m ²
3 Capa de filtro	2 capas de tela filtro no tejida meltblown de 25g/m ² 1 capa de hot air cotton de 50g/m ²
1 Capa interna	Tela no tejida de polipropileno de 25g/m ² , confortable a la piel
Clip nasal	Metálico encapsulado moldeable
Sujetador	Elástico
Talla	Estándar
Medida	15.4* 10.7 cm
Eficiencia de filtración	>95%


PRESENTACIÓN

Caja de 10 mascarillas empaque individual

CARACTERÍSTICAS

Diseño 3D ergonómico
Hipoalergénico
Vigencia 02 años

Instrucciones de Colocación del respirador Kn95

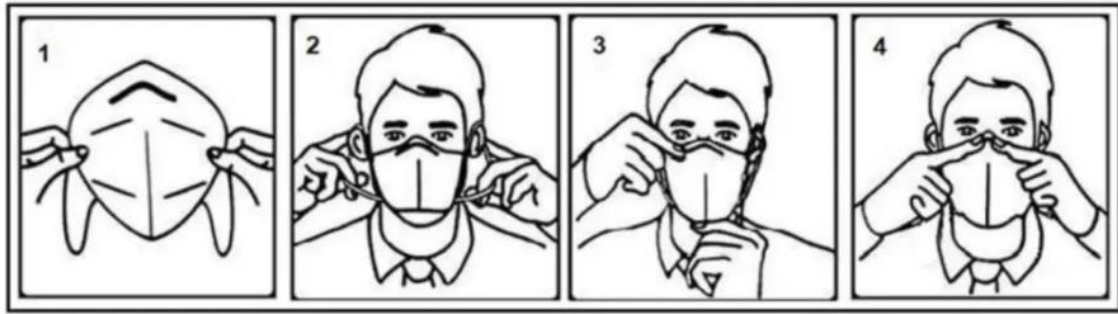

1. Abra el respirador situando el clip nasal hacia arriba y sostenga las tiras de sujeción con ambas manos.
2. Mantenga la parte inferior de la máscara cerca de la barbilla para cubrirse la boca y la nariz.
3. Coloque las tiras de sujeción sobre las orejas.
4. Presione el clip nasal sobre la nariz con las dos manos, moldeándolo a la forma del puente nasal.

